

ALUBAN®

... der Hautschutz, der atmet



Aluminium-Spray

zur Wundabdeckung bei Katzen, Hunden, Geflügel, Schweinen, Wiederkäuern und Pferden

Eigenschaften

Aluban-Aluminiumspray überzieht die Wunde mit einer feinen, elastischen und undurchlässigen Schicht Aluminium, welche die Wunde schützt und Infektionserreger und Verunreinigungen fernhält.

Indikationen

Elastischer und luftdurchlässiger Schutz von Wunden nach Verletzungen und Operationen vor Schmutz und Nässe. Zum Beispiel:

- Schutz und Abdeckung von chirurgischen Nähten nach Operationen
- Wundverband bei wilden Tieren oder Zootieren
- Schutz von Abschürfungen vor Verunreinigung und anderen schädlichen Umwelteinflüssen
- als Wundverband an Körperregionen an welchen herkömmliche Verbände nicht angelegt werden können



Anwendung

Die Wunde nach Reinigung und Desinfizierung aus ca. 20–25 cm besprühen, sodass diese vollständig durch eine dünne, metallisch glänzende Schicht überzogen ist. Ein bis zwei Mal täglich durchführen. Der Schutz dauert jeweils mehrere Stunden. Die Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Bestandteile

Aluminiumpulver mikronisiert

Aufbewahrungshinweis

Lagerung bei Raumtemperatur (15–25°C). Vor Hitze schützen. Nicht in Flammen sprühen. Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

ALUBAN®

... la protection cutanée qui respire



Aluminium-Spray

pour le traitement des plaies
chez les ruminants, les chevaux
et les porcs.

Propriétés

La vaporisation d'Alubet aluminium-spray recouvre la plaie d'une fine couche imper-méable d'aluminium qui la protège et qui constitue une barrière contre les agents infectieux.

Indications

Une protection élastique et perméable à l'air qui protège les plaies, suite à des blessures ou à des opérations, de la saleté et de l'humidité. Par exemple :

- Pansement pour protéger et couvrir les sutures chirurgicales après des opérations
- Pansement pour les animaux sauvages ou les animaux de zoo
- Protection contre les abrasions de la pollution et d'autres influences nocives de l'environnement
- Comme pansement sur les régions du corps où un pansement ordinaire ne peut pas être appliqué

Emploi

Après avoir nettoyé et désinfecté la plaie, vaporiser sur la plaie à une distance d'env. 20 à 25 cm, de sorte que la plaie soit entièrement recouverte d'une fine pellicule métallique brillante. Utiliser une à deux fois par jour. La protection est chaque fois de plusieurs heures. Bien secouer le vaporisateur avant de l'utiliser.

Composition

Poudre d'aluminium micronisée.

Informations concernant la conservation

Conserver à température ambiante (15 à 25°C).
Tenir à l'écart de la chaleur.
Ne pas vaporiser vers une flamme.
A conserver hors de la portée des enfants.

