



Exklusiv bei  
medizinischem  
Fachpersonal  
erhältlich

## Präputialspüllösung zur Reinigung der Vorhaut von Hunden

Schonende und wirksame Spüllösung

### Wie es funktioniert:

Die Sanocyn<sup>forte</sup> Präputialspüllösung für Rüden enthält Inhaltsstoffe, die abgestorbene Zellen sowie Sekret der Schleimhäute, Urinrückstände und zugleich Schmutz ablösen und entfernen. Eine regelmässige Anwendung unterstützt eine saubere und gesunde Vorhaut und vermindert unangenehme Gerüche und spontanes Absondern von Sekreten.

### Inhalt:

Aktives Chlor freigesetzt aus Hypochloriger Säure (HOCL), Aqua, Natriumchlorid

- ✦ bekämpft unangenehme Gerüche
- ✦ vermindert spontanes Absondern von Sekreten
- ✦ schmerzfreie, unkomplizierte Anwendung
- ✦ ohne Alkohol
- ✦ ist pH neutral
- ✦ ohne Farb- oder Duftstoffe
- ✦ sehr gut verträglich

### Anwendung:

Zuerst die Vorhautöffnung mit einem in Sanocyn<sup>forte</sup> Präputialspüllösung getränkten Tupfer reinigen. Anschliessend mit einer Hand die Vorhaut festhalten und mit der anderen Hand den Applikator zwischen Vorhaut und Penis einführen. Die Spüllösung nun durch Druck auf die Flasche einbringen. Dabei gleichzeitig das Präputium mit Daumen und Zeigefinger verschlossen halten und danach mit der anderen Hand massieren, um die Spüllösung in der Vorhautfalte zu verteilen. Anschliessend die Flüssigkeit ablaufen lassen. Zur Reinigung des Präputiums im Falle eines Vorhautkatarrhs an 3 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen anwenden.

### Hinweise:

Das Tragen von Handschuhen bei der Anwendung wird aus hygienischen Gründen empfohlen. Nach der Anwendung den Applikator gründlich unter fliessendem Wasser reinigen.

### Haltbarkeit:

Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

